
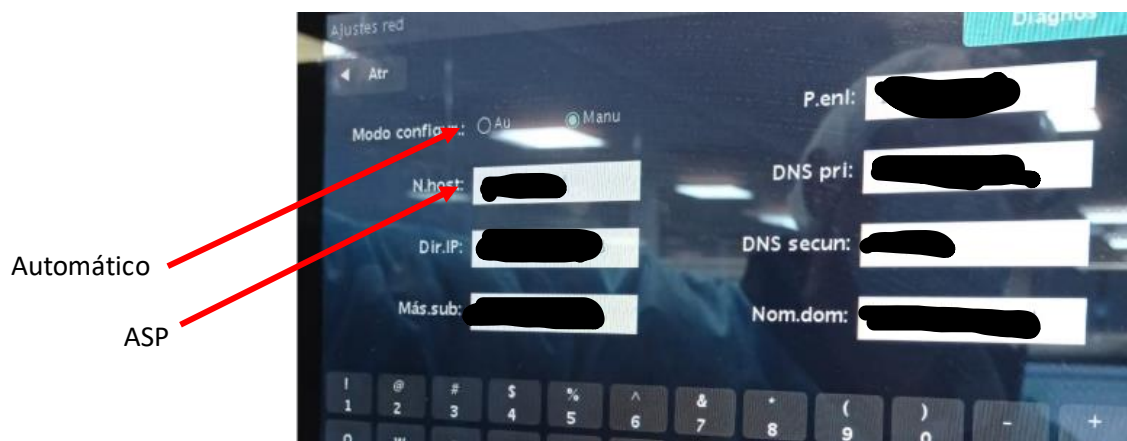


1- Crear carpeta en servidor (Interlab o TI cliente)

- Nombre de la carpeta compartida de destino: este es el nombre de la carpeta compartida en el servidor de PC donde se almacenarán los archivos DTI (CSV y PDF Cycle Data) del producto ASP®. Se requiere una carpeta compartida única para cada producto ASP® que posee el centro de atención médica. El personal de TI del centro sanitario debe crear esta carpeta en su servidor de PC. Cada carpeta compartida debe crearse desde la raíz de la unidad C del servidor de la instalación sanitaria y no debe tener subcarpetas. El nombre de usuario (elemento 11) debe tener derechos de administrador completos en esta carpeta.

2- Configuración de exportación de archivos al servidor: (técnico equipo)

- Nombre del servidor de PC o dirección IP del servidor: ingrese el nombre o la dirección IP del servidor de PC. El nombre del servidor de archivos de PC es el nombre del servidor de PC al que se conectará el producto ASP® (por ejemplo, "ITS.exampleFacility.com" o "192.168.1.100").
- Nombre de host: utilice el nombre de host predeterminado del producto ASP® o proporcione un nombre. El nombre de host debe comenzar con let ((por ejemplo, el nombre de host predeterminado para STERRAD® es NXyyyyyyyyy o 100NXyyyyyyyyy, donde yyyyyyyy es el número de serie del sistema, el nombre de host predeterminado para EVOTECH es EVOTECHCRyyyyy, donde yyyyy es el número de serie de EVOTECH).

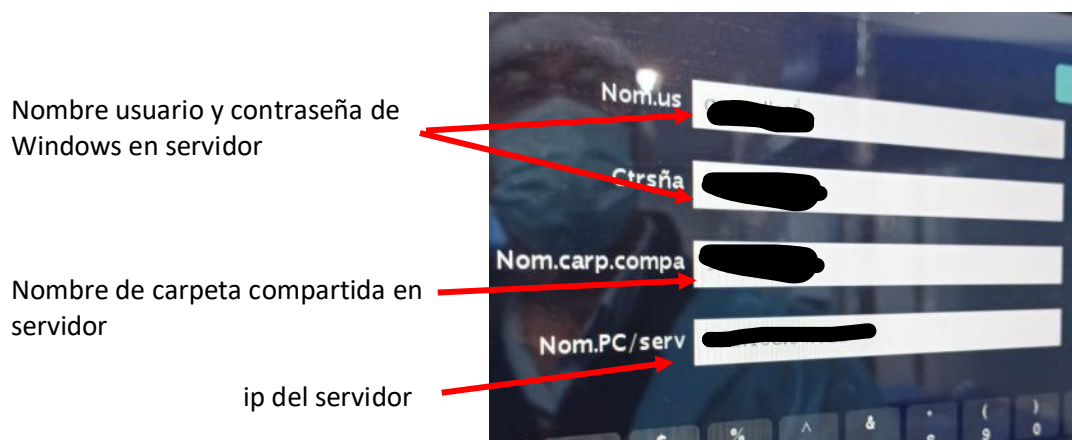

3- Habilitar protocolo SMB1 en servidor. (TI CLIENTE)

#### 4- Configuración de exportación de archivos al servidor: (técnico equipo)

